
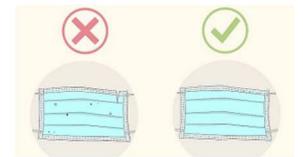
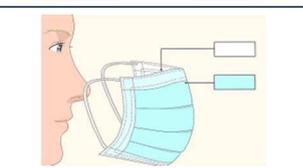
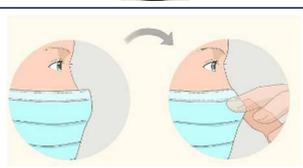


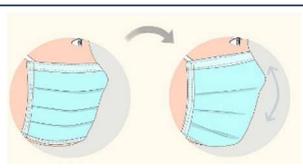

CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 CORRETTO UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE

OPERAZIONI PRELIMINARI		
1		Prima di indossare la mascherina, è necessario lavarsi le mani con acqua e sapone o con un disinfettante.
2		Controlla l'integrità della mascherina, deve essere priva di buchi o strappi. Se la mascherina è difettosa richiedine un'altra.
3		Distendi la mascherina e tieni la parte più rigida verso l'alto e la parte colorata verso l'esterno. Assicurati che il lato bianco sia rivolto verso il tuo viso.
USO		
4		Prendi gli anelli elastici e mettile uno attorno all'orecchio e poi metti il secondo attorno all'orecchio
5		Sistema la parte flessibile del bordo superiore con pollice e indice lungo i lati del naso
6		Sistemare la mascherina sul viso e sotto il mento tirando la parte inferiore della mascherina, coprendo completamente naso e bocca.
7		Non toccare più la mascherina dopo averla indossata. All'occorrenza è possibile spostare la mascherina, posizionandola sotto il mento. <i>Se necessario toccarla, pulire prima le mani con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool.</i>
RIMOZIONE		
9		Prima di togliersi la mascherina, lavarsi le mani. Togliere la mascherina prendendo gli elastici, senza toccare la parte anteriore, rilavarsi le mani prima di rimettere la mascherina.
SMALTIMENTO		
10		Smaltire la mascherina nell'apposito contenitore chiuso e, infine, pulire le mani con acqua e sapone o con un detergente a base di alcool.